

ANWENDUNG NASENKLAMMERN

Erlebe den Unterschied beim Atmen!



1. Nase reinigen

Wasche deine Nase, um Schmutz und Öl zu entfernen. Achte darauf, dass sie vollständig trocken ist, bevor du die magnetischen Nasenstreifen anbringst.



2. Tabs platzieren

Klebe je ein Tab mit dem Tag-Stab links & rechts oberhalb von deinen Nasenflügeln auf. Tipp: Drücke die Tabs ca. 10s leicht an, damit sie gut haften.




3. Klammern anlegen

Setze das BrezyPal-Band auf deine Nase. Die Magnetenden klicken automatisch an die Pads – für sicheren Halt und sofortige Öffnung der Nasenflügel.



4. Tab entfernen

Drücken Sie Ihre Nase vorsichtig zusammen, um die Klammer abzunehmen. Entfernen Sie vorsichtig die Nasentabs von der Haut.

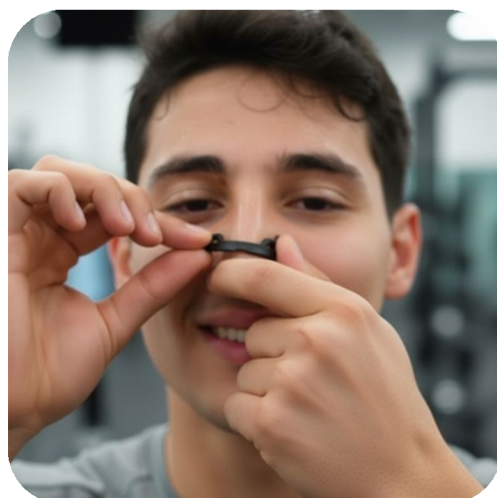

Produkthinweis:

Die Nasentabs sind zum einmaligen Gebrauch und haben eine Haftdauer von 4 – 6 Stunden. Die Tabs können im Restmüll entsorgt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.brezypal.de